


## Instruktionsmanual till behandlingsboxar PM2005

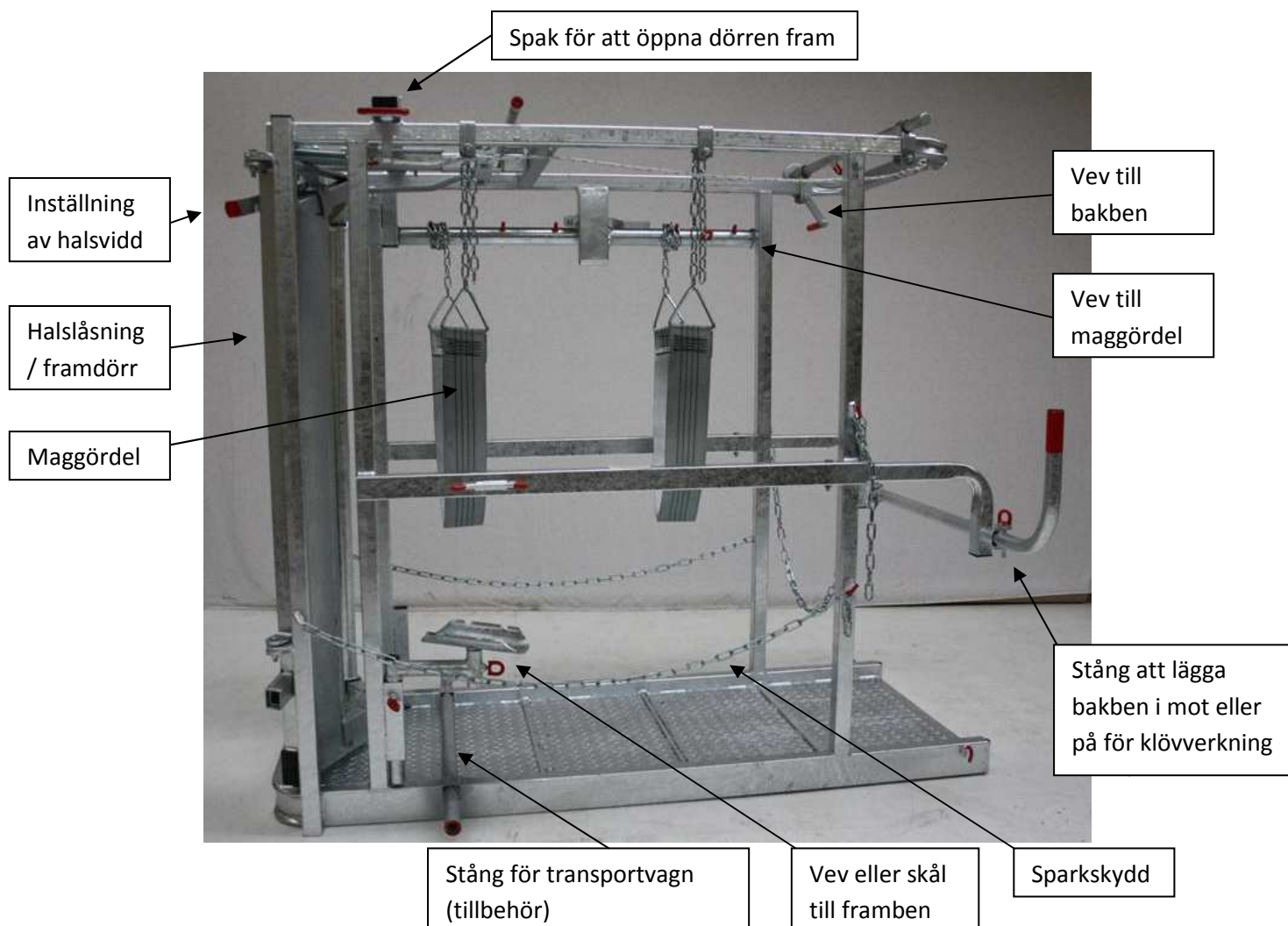

### In- och utsläpp

Se till att framdörr/halslåsning står i låsläge lite snett bakåt som på bilden (gäller för klövverkningsstol med automatisk halslåsning PM85). Släpp in djuret genom att öppna stången i bakkant av boxen. Med den automatiska halslåsningen behöver man inte göra något förutom att se till att halsvidden stämmer, justering görs i framkant. Med den manuella halslåsningen måste man själv låsa halsen på djuret när det kommer in i boxen, detta görs med spaken på sidan.

När djuret står fast kan klövverkningen påbörjas, börja med att hänga upp maggördlarna. Spärrskafvet kan frihjulås genom att man drar ut spaken och vrider den och trycker den nedåt. Behöver man bromsa dras spaken uppåt. Vevarna för framben och bakben är självbromsande, bara veva åt ena eller andra hållet.

För att släppa ut djuret drar man i snöret eller lyfter i hantaget på sidan och motar på djuret framåt. Man kanske får hjälpa till att hålla upp frontgrindarna tills djuren lärt sig. På den manuella öppnas bara halslåsning med spaken så är det fritt framåt.



Vev framben



Transportvagn (tillbehör)